



---

## BreathView®

Software per la gestione delle terapie ventilatorie e del  
sonno di pazienti in trattamento domiciliare

Versione 1.2

Guida Utente

---

# Sommario

---

<b>1</b>	<b>INFORMAZIONI SU BREATHVIEW®</b>	<b>4</b>
1.1	INTRODUZIONE	4
1.2	DICHIARAZIONE SULL'USO PREVISTO	4
1.3	NOTA IMPORTANTE	5
1.4	COMPATIBILITÀ BROWSER WEB E SISTEMI OPERATIVI	5
1.4.1	<i>Browser web</i>	5
1.4.2	<i>Sistemi operativi</i>	5
1.4.3	<i>Software aggiuntivi</i>	5
1.5	ASPETTI DI SICUREZZA	6
1.5.1	<i>Accesso alla piattaforma</i>	6
1.5.2	<i>Autenticazione</i>	6
1.5.3	<i>Autorizzazioni</i>	6
1.5.4	<i>Come mantenere privato l'ambiente di lavoro</i>	7
1.5.5	<i>Utilizzo dei supporti rimovibili</i>	7
1.6	DISPOSITIVI SUPPORTATI	7
<b>2</b>	<b>ACCESSO A BREATHVIEW®</b>	<b>8</b>
2.1	ACCESSO	8
2.2	RECUPERO PASSWORD	8
2.3	LOGOUT	8
<b>3</b>	<b>FUNZIONALITÀ GENERALI</b>	<b>9</b>
3.1	ORGANIZZAZIONI	9
3.2	ACCESSO AD APPLICAZIONI E SOFTWARE COLLEGATI	9
3.3	SUPPORTO E MANUALE D'UTILIZZO	9
<b>4</b>	<b>SEZIONE PAZIENTI - COMPLIANCE</b>	<b>10</b>
4.1	SCHEDA CONFORMITÀ ALLA TERAPIA	10
4.1.1	<i>Elenco conformità alla terapia dei pazienti</i>	10
<b>5</b>	<b>SEZIONE PAZIENTI – ELENCO PAZIENTI</b>	<b>11</b>
5.1	SCHEDA ELENCO PAZIENTI	11
5.1.1	<i>Elenco Pazienti</i>	11
<b>6</b>	<b>SEZIONE PAZIENTI - DETTAGLIO PAZIENTE</b>	<b>13</b>
6.1	CONTENUTO DELLA SEZIONE	13

6.2	SCHEDA RIEPILOGO .....	13
6.2.1	<i>Funzionalità generali</i> .....	14
6.3	SCHEDA TREND NEL TEMPO.....	15
6.3.1	<i>Funzionalità generali</i> .....	16
6.4	SCHEDA FORME D' ONDA NEL TEMPO.....	16
6.4.1	<i>Funzionalità generali</i> .....	17
6.5	SCHEDA ANAGRAFICA .....	17
6.6	SCHEDA DISPOSITIVI .....	17
6.7	SCHEDA LOG PRESCRIZIONI .....	18
<b>7</b>	<b>SEZIONE DISPOSITIVI .....</b>	<b>19</b>
7.1	SCHEDA DI GESTIONE DISPOSITIVI .....	19
7.1.1	<i>Lista dispositivi</i> .....	19
<b>8</b>	<b>SEZIONE NOTIFICHE .....</b>	<b>21</b>
8.1	SCHEDA DI GESTIONE NOTIFICHE.....	21
8.1.1	<i>Elenco notifiche</i> .....	21
<b>9</b>	<b>SEZIONE PROFILO PERSONALE .....</b>	<b>22</b>
9.1	IMPOSTAZIONI ACCOUNT .....	22

# 1 Informazioni su BreathView®

---

## 1.1 Introduzione

BreathView® è un software fruibile via web per la gestione delle terapie ventilatorie e del sonno di pazienti in trattamento domiciliare rivolto al personale sanitario od affine.

Per utilizzare BreathView® collegarsi all'indirizzo web comunicato dal proprio referente.

## 1.2 Dichiarazione sull'uso previsto

BreathView® è destinato all'uso da parte di operatori clinici o fornitori di apparecchiature mediche per raccogliere, memorizzare, gestire e visualizzare dati sull'aderenza alla terapia derivanti da vari dispositivi ventilatori per le terapie respiratorie e del sonno ad uso domiciliare.

Il software offre inoltre la possibilità di visualizzare le prescrizioni impostate sui ventilatori ed arricchire di ulteriori dati terapeutici e amministrativi i profili dei pazienti, nonché impostare notifiche personalizzate.

**Il software non effettua la valutazione o la diagnosi automatica. I dati forniti dal software sono solo uno dei molti elementi da considerare nella valutazione dei livelli di compliance della terapia da parte del paziente.**

## AVVERTENZE

---

- BreathView® è destinato unicamente all'utilizzo in ambiente clinico o presso un fornitore di apparecchiature mediche.
  - Prima di visualizzare i dati di compliance o modificare la prescrizione di un paziente, leggere e comprendere i manuali del dispositivo terapeutico associato.
-

## 1.3 Nota importante

Questa guida, come pure il software in essa descritto, sono forniti con la condizione che vengano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato. Le informazioni in questa guida sono fornite esclusivamente a titolo di istruzione e indicazione e possono essere modificate senza preavviso. Esse non devono essere interpretate come alternativa al parere di un medico qualificato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da errori o imprecisioni che dovessero apparire in questa guida. Senza il consenso scritto del produttore è proibito riprodurre, immagazzinare in sistemi di ripristino, o trasmettere in qualsiasi forma (sia essa elettronica, meccanica, registrata o altro) parte di questa guida o dei programmi per computer in essa descritti.

## 1.4 Compatibilità browser web e sistemi operativi

### 1.4.1 Browser web

BreathView® è compatibile con i seguenti browser:

- Mozilla Firefox ver 54 e successive;
- Microsoft Edge ver 40.15063 e successive;
- Microsoft Internet Explorer 11.

### 1.4.2 Sistemi operativi

BreathView® è compatibile con i seguenti sistemi operativi:

- Windows 10 e versioni successive.

### 1.4.3 Software aggiuntivi

I seguenti programmi (o alternativi) sono necessari per visualizzare i report in pdf prodotti da BreathView®.

- Adobe Acrobat Reader 10.0.1 e versioni successive.

Versioni precedenti di questi programmi (o di loro alternative) non sono ufficialmente supportate.

## 1.5 Aspetti di sicurezza

### 1.5.1 Accesso alla piattaforma

BreathView® è accessibile tramite browser web mediante l'inserimento di username e password. Per ottenere un account di accesso alla piattaforma contattare il proprio referente od amministratore.

Le comunicazioni con il browser sono criptate e l'accesso a BreathView® può avvenire da una rete pubblica o privata in accordo alla tipologia di configurazione.

Al fine di mantenere un ambiente di lavoro sicuro è opportuno che vengano utilizzate postazioni con attivi sistemi di protezione e non accessibili al pubblico.

### 1.5.2 Autenticazione

BreathView®, in relazione alla tipologia di configurazione, può prevedere un sistema di autenticazione autonomo od essere integrato con sistemi di autenticazione aziendali.

### 1.5.3 Autorizzazioni

BreathView® supporta la gestione di molteplici organizzazioni e prevede diverse tipologie di profili utente. I profili sono associati ad un'organizzazione. Un utente può aver associati profili diversi in molteplici organizzazioni.

I profili standard hanno accesso ai dati dei propri pazienti e dei pazienti della propria organizzazione.

I profili di amministrazione consentono di creare utenti nell'ambito di un'organizzazione, attribuire ad essi un profilo nell'organizzazione ed associare profili ad utenti di altre organizzazioni.

## NOTE

---

- Gli amministratori hanno accesso alla reimpostazione delle password utente e alla gestione delle impostazioni utente. È vivamente raccomandato disporre di più di un account amministratore per assistenza nella gestione di utenti, password e impostazioni.
-

### 1.5.4 Come mantenere privato l'ambiente di lavoro

Durante l'utilizzo di qualsiasi software che consenta di visualizzare e gestire i dati dei pazienti, rispettare le linee guida seguenti per proteggere l'ambiente di lavoro e impedire l'accesso non autorizzato ai dati dei pazienti.

- Bloccare il PC per proteggere i dati quando è necessario allontanarsi dall'ambiente di lavoro.
- Oscurare o bloccare automaticamente la visualizzazione dopo un determinato periodo di inattività quando all'ambiente di lavoro possono accedere utenti non autorizzati.

### 1.5.5 Utilizzo dei supporti rimovibili

I supporti rimovibili possono essere una fonte di malware o virus. Prima di caricare i dati, assicurarsi che i supporti siano analizzati utilizzando il software antivirus installato localmente.

## 1.6 Dispositivi supportati

BreathView® supporta diversi modelli di dispositivi terapeutici per le terapie sonno correlate e per le terapie ventilatorie, che possono variare a seconda delle diverse installazioni.

### NOTE

---

- Contattare l'amministratore o il proprio referente per conoscere i dispositivi supportati dall'installazione in uso.
-

## 2 Accesso a BreathView®

---

### 2.1 Accesso

Per accedere a BreathView® è necessario collegarsi al browser all'indirizzo fornito ed inserire:

- Username - che corrisponde all'indirizzo email;
- Password - la password di cui si è in possesso.

### NOTE

---

- Qualora non si abbiano le credenziali per accedere a BreathView® rivolgersi all'amministratore.
- 

### 2.2 Recupero password

Per effettuare l'operazione di recupero password selezionare la scritta "Clicca qui per il reset della tua password".

Inserire l'indirizzo mail ed attendere la mail con le istruzioni per reimpostare la password.

### 2.3 Logout

La funzionalità **Logout** serve a disconnettersi dalla piattaforma. A seguito della disconnessione sarà necessario reinserire username e password per una nuova sessione d'uso.

Per effettuare il **Logout**, selezionare la voce **Logout** nel menu **Profilo Personale** sulla barra di navigazione superiore.

### NOTE

---

- Per essere sicuri che non vi sia un utilizzo non autorizzato di BreathView®, effettuare sempre il logout una volta terminata la sessione d'uso, prima di chiudere la finestra del browser.
-



## 3 Funzionalità generali

---

### 3.1 Organizzazioni

La funzionalità **Organizzazioni** serve a definire in quale organizzazione operare.

Selezionando **Organizzazioni** dalla barra di navigazione superiore è possibile effettuare la scelta dell'organizzazione di appartenenza in cui operare.

BreathView® gestisce molteplici organizzazioni. Ogni organizzazione contiene i propri pazienti.

Gli utenti che appartengono ad un'organizzazione hanno facoltà di operare sui pazienti propri e dell'organizzazione.

#### NOTE

---

- Ogni utente può appartenere contemporaneamente a molteplici organizzazioni.
- 

### 3.2 Accesso ad applicazioni e software collegati

Attraverso il menu **Apps** è possibile aprire altre applicazioni della suite.

- Selezionare Apps;
- Scegliere l'applicazione da utilizzare.

### 3.3 Supporto e Manuale d'utilizzo

Attraverso il menu **Help** è possibile accedere a:

- Supporto Email;
- Manuale d'utilizzo del software.

## 4 Sezione Pazienti - Compliance

---

### 4.1 Scheda Conformità alla terapia

In questa scheda viene mostrata la conformità dei pazienti alla terapia.

#### 4.1.1 Elenco conformità alla terapia dei pazienti

Nell'elenco sono mostrati i pazienti con le indicazioni sulla conformità alla terapia, tra cui:

- Giorni d'uso;
- Utilizzo medio giornaliero;
- Ore d'uso;
- Perdite.

Per visualizzare l'elenco **Conformità alla terapia dei pazienti**, selezionare la voce **Compliance** nel menu **Pazienti** sulla barra di navigazione superiore.

#### Funzionalità filtro

Con questa funzionalità è possibile restringere il set di pazienti mostrato, impostando diversi filtri, tra cui: Stato paziente, Tipo paziente, Paziente in carico a, Terapia.

Per impostare i filtri: selezionare dai menu a tendina i filtri scelti; confermare selezionando il bottone **Cerca**.

#### Funzionalità Prescrizioni

Nella scheda Conformità alla terapia è possibile accedere alla scheda Log Prescrizioni (6.7 Scheda Log Prescrizioni).

Per accedere alla scheda Log Prescrizioni selezionare il bottone:



## 5 Sezione Pazienti – Elenco Pazienti

---

### 5.1 Scheda Elenco Pazienti

In questa scheda viene mostrato l'elenco dei pazienti già censiti su una determinata Organizzazione.

#### 5.1.1 Elenco Pazienti

Nell'elenco sono mostrati i pazienti con diverse informazioni anagrafiche, tra cui:

- Cognome;
- Nome;
- Data di nascita;
- Età;
- Sesso.

Per visualizzare l'**Elenco Pazienti**, selezionare la voce **Elenco Pazienti** nel menu **Pazienti** sulla barra di navigazione superiore.

#### Funzionalità inserimento nuovo paziente

Attraverso questa funzionalità è possibile creare un nuovo profilo paziente che verrà successivamente mostrato nella scheda **Elenco Pazienti**.

Per inserire un nuovo paziente selezionare il bottone: 

Seguire la procedura guidata inserendo le informazioni anagrafiche richieste e selezionare il bottone **Continua** per passare alle fasi successive della procedura guidata.

Per concludere l'inserimento, selezionare il bottone **Conferma**.

Il paziente è ora presente in BreathView®.

## NOTE

---

- Le informazioni anagrafiche del paziente possono essere modificate in qualsiasi momento, qualora si disponga delle autorizzazioni necessarie.
-

### [Funzionalità cerca paziente](#)

Per cercare un paziente è necessario selezionare la casella di ricerca:

Cerca:

Per cercare il paziente, digitare nella casella di ricerca il nome, il cognome, la data di nascita, l'età o il sesso del soggetto ricercato.

In base ai dati immessi, verranno visualizzati automaticamente i pazienti pertinenti.

BreathView® offre opzioni per l'ordinamento per visualizzare e individuare in modo ottimale i pazienti all'interno del sistema.

Ordinamento: Per modificare l'ordinamento (ascendente o discendente) dei valori nella colonna, selezionare sull'intestazione della colonna.

### [Funzionalità dettaglio paziente](#)

Attraverso questa funzionalità è possibile accedere alla Sezione Pazienti – Dettaglio Paziente (6 Sezione Pazienti - Dettaglio Paziente)

Per accedere alla funzionalità Dettaglio Paziente selezionare il bottone:



### [Funzionalità elimina paziente](#)

Attraverso questa funzionalità è possibile eliminare un profilo paziente.

Per eliminare un paziente selezionare il bottone:



Per confermare l'eliminazione del paziente, selezionare il bottone **Conferma**.

Il paziente è ora eliminato da BreathView®.

## 6 Sezione Pazienti - Dettaglio Paziente

---

In questa sezione viene mostrato il dettaglio del paziente già censito su una determinata Organizzazione.

### 6.1 Contenuto della sezione

Nella sezione **Pazienti – Dettaglio Paziente** vengono mostrate diverse schede, tra cui:

- Riepilogo (par. 6.2 Scheda Riepilogo);
- Trend nel tempo (par. 6.3 Scheda Trend nel tempo);
- Forme d'onda nel tempo (par. 6.4 Scheda Forme d' onda nel tempo);
- Anagrafica (par. 6.5 Scheda Anagrafica );
- Dispositivi (par. 6.6 Scheda Dispositivi);
- Log Prescrizioni (par. 6.7 Scheda Log Prescrizioni).

Per visualizzare il **Dettaglio Paziente**, selezionare il nominativo di un paziente dalla scheda **Elenco Pazienti** o dalla scheda **Compliance**.

### 6.2 Scheda Riepilogo

Nella scheda **Riepilogo** è possibile visualizzare diverse informazioni, alla data di ultima connessione del device medico, tra cui:

- Conformità alla terapia;
- Statistiche;
- Pattern d'utilizzo nelle 24 ore;
- Ore d'utilizzo giornaliero;
- Pressione;
- Statistiche settimanali.

#### Funzionalità zoom


Attraverso la funzionalità **Zoom** è possibile reimpostare l'area di visualizzazione di alcuni grafici.

Per effettuare lo zoom dell'area di visualizzazione è necessario selezionare l'area di interesse sul grafico.

#### Funzionalità reset zoom

Attraverso la funzionalità **Reset Zoom** è possibile tornare all'area di visualizzazione di default.

Per effettuare il **Reset Zoom**, selezionare il bottone:

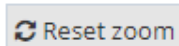

## 6.2.1 Funzionalità generali

### Funzionalità gestione soglie

Attraverso la funzionalità **Gestione Soglie** è possibile impostare l'intervallo di valori personalizzati per i quali vi è conformità alla terapia del paziente.

Per impostare le soglie selezionare la funzionalità **Gestione Soglie** e successivamente impostare le soglie d'interesse, tra cui:

- Utilizzo minimo giornaliero maggiore di (Ore);
- Perdite inferiore a (L/min);
- Ossigeno inferiore a (SpO2%);
- Evento desaturazione con diminuzione SpO2 pari a (%);
- Indice livello di desaturazione maggiore di (n);

Le soglie di conformità vengono ricalcolate a partire dalla data impostata in: **Elabora la conformità da**.

Per confermare l'impostazione selezionare il bottone **Invia**.

In caso di digitazione errata è possibile annullare l'operazione selezionando il bottone **Chiudi**.

Per visualizzare la funzionalità **Gestione Soglie**, selezionare **Gestione Soglie** nel menu **Strumenti**.

### Funzionalità cancella tracciati ventilazione

Attraverso la funzionalità **Cancella tracciati ventilazione** è possibile eliminare i tracciati di ventilazione.

Per effettuare la cancellazione dei tracciati di ventilazione, seguire la procedura guidata.

Per visualizzare la funzionalità **Cancella tracciati ventilazione**, selezionare **Cancella tracciati ventilazione** nel menu **Strumenti**.

### Funzionalità Scarica report

Attraverso la funzionalità **Scarica report** è possibile scaricare diverse tipologie di report, tra cui:

- Report di conformità;
- Report della terapia;
- Report di conformità e terapia;
- Report dettagliato;
- Report personalizzato.

Per effettuare il download dei report selezionare il bottone:



Successivamente scegliere il report da scaricare.

## NOTE

---

- I report sono riferiti all'intervallo di analisi impostato, con esclusione dei report personalizzati.
- 

### [Funzionalità impostazione periodo di analisi](#)

Attraverso la funzionalità **Periodo di analisi** è possibile filtrare il lasso temporale di interesse.

Di default viene mostrato un periodo di 30 giorni, è possibile selezionare il lasso temporale preferito scegliendo, ad esempio, tra: Oggi; Ieri; Ultimi 7 Giorni Disponibili; Ultimi 30 Giorni Disponibili; Intervallo personalizzato (Da – A).

La scelta del periodo è confermata selezionando il bottone **Applica**. In caso di digitazione errata è possibile annullare l'operazione selezionando il bottone **Cancella**.

## NOTE

---

- Il calendario distingue tra date di “misurazione” e di “acquisizione”. Per data di misurazione si intende la data associata al parametro biomedico al momento della rilevazione da parte del dispositivo medico.
- 

### 6.3 Scheda Trend nel tempo

Nella scheda **Trend nel tempo** è possibile visualizzare i valori medi nel tempo di diversi parametri, tra cui:

- Respiri al minuto (BPM);
- Perdite (l/min);
- Flusso (l/min);
- Respiri innescati dal paziente (%);
- Picco del flusso (l/min);
- Ti/Tot (%);
- VTE (ml);
- SpO2 (%);
- Battiti (PRBPM).

### [Funzionalità zoom](#)


Attraverso la funzionalità **Zoom** è possibile reimpostare l'area di visualizzazione dei grafici.

Per effettuare lo zoom dell'area di visualizzazione è necessario selezionare l'area di interesse sul grafico.

#### [Funzionalità reset zoom](#)

Attraverso la funzionalità **Reset Zoom** è possibile tornare all'area di visualizzazione di default.

Per effettuare il **Reset Zoom**, selezionare il bottone:

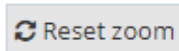

### 6.3.1 Funzionalità generali

Far riferimento al par 6.2.1 Funzionalità generali.

## 6.4 Scheda Forme d'onda nel tempo

Nella scheda **Forme d'onda nel tempo** è possibile visualizzare in modo analitico gli score ottenuti, alla data di ultima connessione del device medico, di diversi parametri, tra cui:

- Respiri al minuto (BPM);
- Flusso (l/min) ;
- Perdite (l/min);
- Pressione (cmH2O);
- VTE (ml);
- SpO2 (%);
- Frequenza cardiaca (PRBPM);
- Stato I/E.

#### [Funzionalità zoom](#)


Attraverso la funzionalità **Zoom** è possibile reimpostare l'area di visualizzazione dei grafici.

Per effettuare lo zoom dell'area di visualizzazione è necessario selezionare l'area di interesse sul grafico.

#### [Funzionalità reset zoom](#)

Attraverso la funzionalità **Reset Zoom** è possibile tornare all'area di visualizzazione di default.

Per effettuare il **Reset Zoom**, selezionare il bottone:

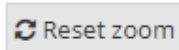



### 6.4.1 Funzionalità generali

Far riferimento al par 6.2.1 Funzionalità generali.

## 6.5 Scheda Anagrafica

Nella scheda **Anagrafica** è possibile visualizzare, ed in caso modificare, ogni dato di un paziente già censito su BreathView®, qualora si disponga delle autorizzazioni necessarie.

La scheda è suddivisa in sottosezioni:

- Dati personali;
- Indirizzo;
- Recapiti;
- Impostazioni;
- Note.

Ogni sottosezione può essere modificata, qualora si disponga delle autorizzazioni necessarie, selezionando il bottone **Modifica**.

Per confermare selezionare il bottone **Invia**.

In caso di digitazione errata è possibile annullare l'operazione selezionando il bottone **Annulla**.

## 6.6 Scheda Dispositivi

Nella scheda **Dispositivi** è possibile visualizzare i dispositivi associati al paziente.

Nella scheda **Dispositivi** sono presenti diverse informazioni, tra cui:


- Modello del dispositivo;
- Numero seriale;
- Stato;
- Data di associazione;
- Ultimo aggiornamento.

BreathView® consente a medici e operatori clinici di aggiungere e assegnare le apparecchiature ai pazienti. Le apparecchiature, le prescrizioni, i dati delle terapie e le voci dei registri delle attività dei pazienti saranno visualizzati in BreathView® solo per i dispositivi supportati.

### [Funzionalità inserimento nuovo dispositivo](#)

Attraverso questa funzionalità è possibile associare al profilo paziente un nuovo dispositivo.

Per associare un nuovo dispositivo ad un paziente selezionare il bottone:

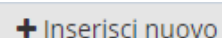A rectangular button with a light gray background. It contains a small blue plus icon followed by the text "Inserisci nuovo" in a blue sans-serif font.

Seguire la procedura guidata inserendo le informazioni richieste e selezionare il bottone **Continua** per passare alle fasi successive della procedura guidata.

Per concludere l'inserimento, selezionare **Conferma**.

#### [Funzionalità dissocia dispositivo](#)

Attraverso questa funzionalità è possibile dissociare i dati raccolti dal dispositivo, dal paziente.

Per dissociare un dispositivo da un paziente selezionare il bottone:

A rectangular button with a light red background and a thin red border. It contains a small red icon of two crossed arrows followed by the text "Dissocia" in a red sans-serif font.

I dati attualmente presenti rimarranno associati alla persona corrente.

## 6.7 Scheda Log Prescrizioni

Nella scheda **Log Prescrizioni** è possibile visualizzare l'elenco delle variazioni alle impostazioni dei dispositivi in uso al paziente durante le diverse fasi della terapia in corso.

## 7 Sezione Dispositivi

---

### 7.1 Scheda di Gestione Dispositivi

In questa scheda vengono mostrati i dispositivi inerenti ai pazienti già censiti in una Organizzazione.

#### 7.1.1 Lista dispositivi

Attraverso **Lista dispositivi** è possibile visualizzare diverse informazioni relative ai dispositivi dell'Organizzazione, tra cui:

- Modello del dispositivo;
- Numero Seriale;
- Paziente associato;
- Data di associazione;
- Ultimo aggiornamento.

Per visualizzare la **Lista Dispositivi**, selezionare la voce **Lista Dispositivi** nel menu **Dispositivi** sulla barra di navigazione superiore.

#### [Funzionalità ricerca del dispositivo](#)

Per cercare un dispositivo è necessario selezionare la casella di ricerca: Cerca:

Per cercare il dispositivo, digitare nella casella di ricerca il modello, il seriale, il paziente associato, la data di associazione, l'ultimo aggiornamento del dispositivo ricercato.

In base ai dati immessi, verranno visualizzati automaticamente i dispositivi pertinenti.

BreathView® offre opzioni per l'ordinamento per visualizzare e individuare in modo ottimale i dispositivi all'interno del sistema.

## NOTE


---

- Per modificare l'ordinamento (ascendente o discendente) dei valori nella colonna, selezionare sull'intestazione della colonna.
- 

#### [Funzionalità inserimento nuovo dispositivo](#)

Attraverso questa funzionalità è possibile inserire un nuovo dispositivo, che verrà successivamente mostrato nella scheda **Dispositivi**.

Per inserire un nuovo dispositivo selezionare il bottone:

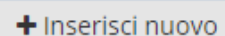 + Inserisci nuovo

Seguire la procedura guidata inserendo le informazioni richieste e selezionare il bottone **Continua** per passare alle fasi successive della procedura guidata.

Per completare l'inserimento del nuovo dispositivo occorre il modello ed il numero seriale.

Per concludere l'inserimento selezionare **Conferma**.

Il dispositivo è ora presente in BreathView®.

#### [Funzionalità associazione dispositivo](#)

Attraverso questa funzionalità è possibile associare i dati raccolti dal dispositivo ad un paziente.

Per associare un dispositivo da un paziente selezionare il bottone:

 Associa

È necessario indicare la data da cui far partire l'associazione.

A partire dalla data indicata tutte le misure in archivio saranno associate al paziente selezionato.

#### [Funzionalità dissociazione dispositivo](#)

Attraverso questa funzionalità è possibile dissociare i dati raccolti dal dispositivo, dal paziente.

Per dissociare un dispositivo da un paziente selezionare il bottone:

 Dissocia

I dati attualmente presenti rimarranno associati alla persona corrente.

#### [Funzionalità eliminazione dispositivo](#)

Attraverso questa funzionalità è possibile eliminare il dispositivo da BreathView®.

Per eliminare un dispositivo da BreathView® selezionare il bottone:

 Elimina

L'eliminazione del dispositivo non comporta alcuna perdita di dati.

## 8 Sezione Notifiche

---

### 8.1 Scheda di Gestione Notifiche

In questa scheda vengono mostrate le notifiche relative all'Organizzazione.

#### 8.1.1 Elenco notifiche

Nella scheda **Elenco notifiche** è possibile visualizzare diverse informazioni, tra cui:

- Data notifica;
- Eventi;
- Descrizione notifica;

Per visualizzare l'**Elenco notifiche**, selezionare la voce **Elenco notifiche** nel menu **Notifiche** sulla barra di navigazione superiore.

#### Funzionalità dettaglio paziente

Attraverso questa funzionalità è possibile accedere alla Sezione Pazienti – Dettaglio Paziente (6 Sezione Pazienti - Dettaglio Paziente)

Per accedere alla funzionalità Dettaglio Paziente selezionare il bottone:



#### Funzionalità filtro

Attraverso questa funzionalità è possibile restringere il set di notifiche mostrato, impostando diversi filtri, tra cui: Data notifica; Eventi; Descrizione notifica; Nome Paziente.

Per impostare i filtri: digitare i parametri di interesse e successivamente confermare selezionando il bottone **Filtra**.

In caso di digitazione errata o per annullare i filtri è possibile selezionare il bottone **Reset**.

## 9 Sezione profilo personale

---

### 9.1 Impostazioni account

Attraverso **Impostazioni account** è possibile:

- verificare e modificare le proprie informazioni utente tra cui: Nome, Cognome ed i recapiti;
- reimpostare la password.

Per visualizzare e modificare i dati del proprio account, selezionare **Impostazioni account** nel menu a tendina posto nella barra di navigazione superiore.

Per modificare le informazioni personali contenute nei campi, selezionare il bottone **Modifica**. Per confermare le modifiche selezionare il bottone **Conferma**.

Per reimpostare la password, una volta compilati i campi richiesti, selezionare il bottone **Conferma**.



Produttore:

Aenduo S.r.l. – C.F. P.Iva 12404861002

Via Properzio 5 - 00193 – Roma - Italia

[www.aenduo.com](http://www.aenduo.com)



© 2020 Aenduo S.r.l. Tutti i diritti riservati.